

CEL | MAT® WOUND H

CelMat® Wound H

Sodyum hiyalüronat içeren biyoselüloz nemlendirici örtü

CelMat® Wound H Örtüsünün ana bileşeni, toksik olmayan, tahriş etmeyen, alerjen olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen özelliklere sahip tamamen doğal bir malzeme olan biyoselülozdur. Pansumanın karakteristik özellikleri şunlardır: esneklik, yüksek mekanik dayanıklılık ve yakl. %96 CelMat® Wound H Örtüsü, iyileşme sürecini destekleyen ve rahatlık ve ağrının giderilmesi için önemli bir soğutma etkisi sağlayan uygun nemli bir ortam yaratır. CelMat® Wound H Örtüsü ayrıca yaralardaki sıvıları emebilirken, seçici gaz geçirgenliği, uygun terlemeyi ve termoregülasyonu koruyarak iyileşme sürecini kısaltır. Sodyum hiyalüronat cilt nemini artırır, epidermis üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur, cildi pürüzsüzleştirir ve canlandırır.

Endikasyonlar

CelMat® Wound H, biyoselüloz nemlendirici yara örtüsü aşağıdakilerin yönetimi için kullanılabilir:

- Estetik cilt tedavilerinden kaynaklanan tahriş ve şişlikler,
- kozmetik tedavilerin neden olduğu cilt hasarları (örn. lazer tedavisi, mezoterapi, mikrodermabrazyon, peeling),
- atopik cilt değişiklikleri,
- 1. ve 2. derece yanıklar,
- granülasyon fazı ile iyileşen yaralar.

uyarılar

Sadece tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilmemelidir. Ambalajında hasar olması durumunda kullanmayınız.

İtiraz

Ürünün bileşenlerine karşı toleranssızlık

Depolama koşulları

Saklama sıcaklığı 4°C ila 28°C'dir.

Kullanım Talimatı

- CelMat® Wound H uygulama yerini iyice temizleyin.
- Steril ambalajı açın ve her iki tarafındaki koruyucu kumaşları çıkarın. Pansumanın her iki bölgesi de kullanılabilir.
- Gerektiğinde steril makas kullanılarak pansuman istenilen ölçüye ayarlanabilir.
- CelMat® Wound H30 ila 120 dakika arasında uygulanabilir.
- İsteğe bağlı olarak CelMat® Wound H, yerinde tutmak ve kurumasını önlemek için ikincil bir poliüretan yara örtüsü ile kapatılabilir. Daha sonra uygulama süresi 24 saate kadar uzatılabilir.

CelMat® Wound Huygulama sıklığı mutlaka bir tıp doktoruna danışılmalıdır.

CelMat® Wound H - biyoselüloz nemlendirici yara örtüsü tek kullanımlıktır. Profesyonel kullanım için tıbbi cihaz sınıfı IIb.

Bitiş tarihi

İç ve dış ambalaj üzerinde belirtilen üretim tarihinden itibaren iki yıldır. Üretim tarihi, GGAAYY sıralamasındaki seri numarasının (SN) ilk 6 hanesidir.

güncellendi: 12.2015.



Üretici
BOWIL Biotech Sp. z o.o.
7, Skandynawska Street
84-120 Władysławowo, Polonya
www.bowil.pl

BOWIL BIOTECH

